

INSTRUKCJA OBSŁUGI OCZOMYJKI



ZASTOSOWANIE:

Opłukiwanie ran, mechaniczne wypłukiwanie oczu, wypłukiwanie i czyszczenie jamy ustnej, czyszczenie i opłukiwanie narzędzi i urządzeń chirurgicznych, irygacja pooperacyjna.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. umieść lejek do oczu na butelce
2. obracając o 180° zwolnij plastikowe zamknięcie
3. przyłóż lejek do oka
4. naciskaj na butelkę i płucz aż do opróżnienia

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w stanie nieotwartym i nieuszkodzonym, w suchym miejscu w temperaturze 5 - 25 °C. Kruchości materiału i plastikowego opakowania można zapobiec nie wystawiając produktu na działanie promieni słonecznych lub promieniowanie UV.