

256052 - 256053

1. Załóż nasadkę przed użyciem pudełka.



2. Po napełnieniu 80% objętości pudełka zamknij pokrywę bezpieczeństwa dociskając ją. Dwie pozycje pokrywy – awaryjna i końcowa.



Wycięcia w nasadce służą do wyjmowania zużytych igieł iniekcyjnych bez dotykania ich ludzką ręką.

Określono dopuszczalną masę napełnienia									
4 L	2,4 Kg	5 L	3 Kg	6 L	3,6 Kg	8 L	4,8 Kg	10 L	5,4 Kg

Pudełka mogą być wypełnione odpadami, w skład których wchodzi również pozostałości płynne. Całkowita zawartość cieczy w odpadach nie może przekraczać 5% dopuszczalnej masy napełniającej. Jeśli przekroczy ten limit, do odpadów zawsze należy dodać odpowiednią ilość absorbentu. Pudełka nie gwarantują długotrwałej absolutnej szczelności. Przed utylizacją pozostawić w pozycji napełniania. Nie może dojść do uszkodzeń mechanicznych i deformacji samego pojemnika na skutek niewłaściwego obchodzenia się z nim.